

Urządzenie rehabilitacyjne UMR2 –

zastosowanie w chorobie Parkinsona

w chorobie Parkinsona zaleca się zastosowanie masażu rozluźniającego całego ciała dla poprawienia krążenia i rozluźnienia mięśni. Szczególną uwagę należy poświęcić masażowi grzbietu, karku oraz pośladków wykonując głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, wibrację. Masaż taki, aby był skuteczny, powinien być długotrwały. Zastosowanie urządzenia UMR2 z użyciem masażu pulsacyjnego wspomaga pracę masażysty, poprawia ukrwienie i nie powoduje uszkodzeń włosowatych naczyń krwionośnych.

Zaleca się masaż min. 3 razy w tygodniu

Masaż dla osób dotkniętych udarem –

masaż antyodleżynowy z wykorzystaniem urządzenia do rehabilitacji UMR 2

UMR2 to nowoczesny i funkcjonalny wyrób medyczny przeznaczony do wykonywania masażu pulsacyjnego. Elementem masującym jest aplikator membranowy zasilany wodą w obiegu zamkniętym. Siła masażu oraz częstotliwość drgań membran masujących regulowane są pokrętkiem częstotliwości. Odpowiednio dobrany rodzaj membrany oraz możliwości w zakresie regulowanej siły i częstotliwości drgań membran, pozwalają uzyskać „efekt przekrwienia” w czasie dwukrotnie krótszym niż przy masażu ręcznym. Ma to szczególne znaczenie przy masażach długotrwałych np. u osób obłożnie leżących, gdy masaż może być wykonywany w warunkach domowych.

Opcja mobilna- z dojazdem do domu pacjenta z urządzeniem UMR2 do masażu rehabilitacyjnego Zaleca się masaż min. 3 razy w tygodniu